



## KIT DE CRYOTHÉRAPIE MAGNÉTIQUE : JARRET

Effets 3 en 1 :

- Cryothérapie
- Compression
- Champ magnétique



## NOTRE SYSTÈME

Nos kits Equi'Nov ont été conçus pour favoriser la récupération après un traumatisme ou après l'effort.

Ils ont une action antalgique et génèrent des effets anti-hémorragique, anti-œdémateux, et myorelaxant.

Notre tissu magnétique  réduit la douleur et les gonflements, tout en stimulant la circulation sanguine. Il favorise l'élimination des toxines et les processus de guérison et de récupération. Enfin il permet de préparer les muscles et les tendons à l'effort.

Disponible en taille universelle ajustable.

Le kit jarret est vendu à l'unité.

- Placer le kit au minimum 8h au congélateur, avant utilisation. Cependant, si le kit est remis au congélateur dès la fin d'une séance de cryothérapie, 2 h de congélation seront alors suffisantes pour préparer la prochaine séance.

- Une séance de cryothérapie doit durer 20 à 30 minutes maximum

- Appliquer entre 5 et 10 pressions avec la pompe, en fonction du ressenti et des préférences du cheval.

Nos différents kits constituent un dispositif de cryothérapie légère qui permet d'accéder aux zones difficiles à traiter, comme dans les cas de blessures profondes des tendons, ou de lacérations.

La combinaison de ces effets permet à nos produits d'être un outil indispensable pour une récupération plus rapide avec une rééducation facilitée et moins douloureuse.

